



MIRAcle

EXIGO 3 Szybki start

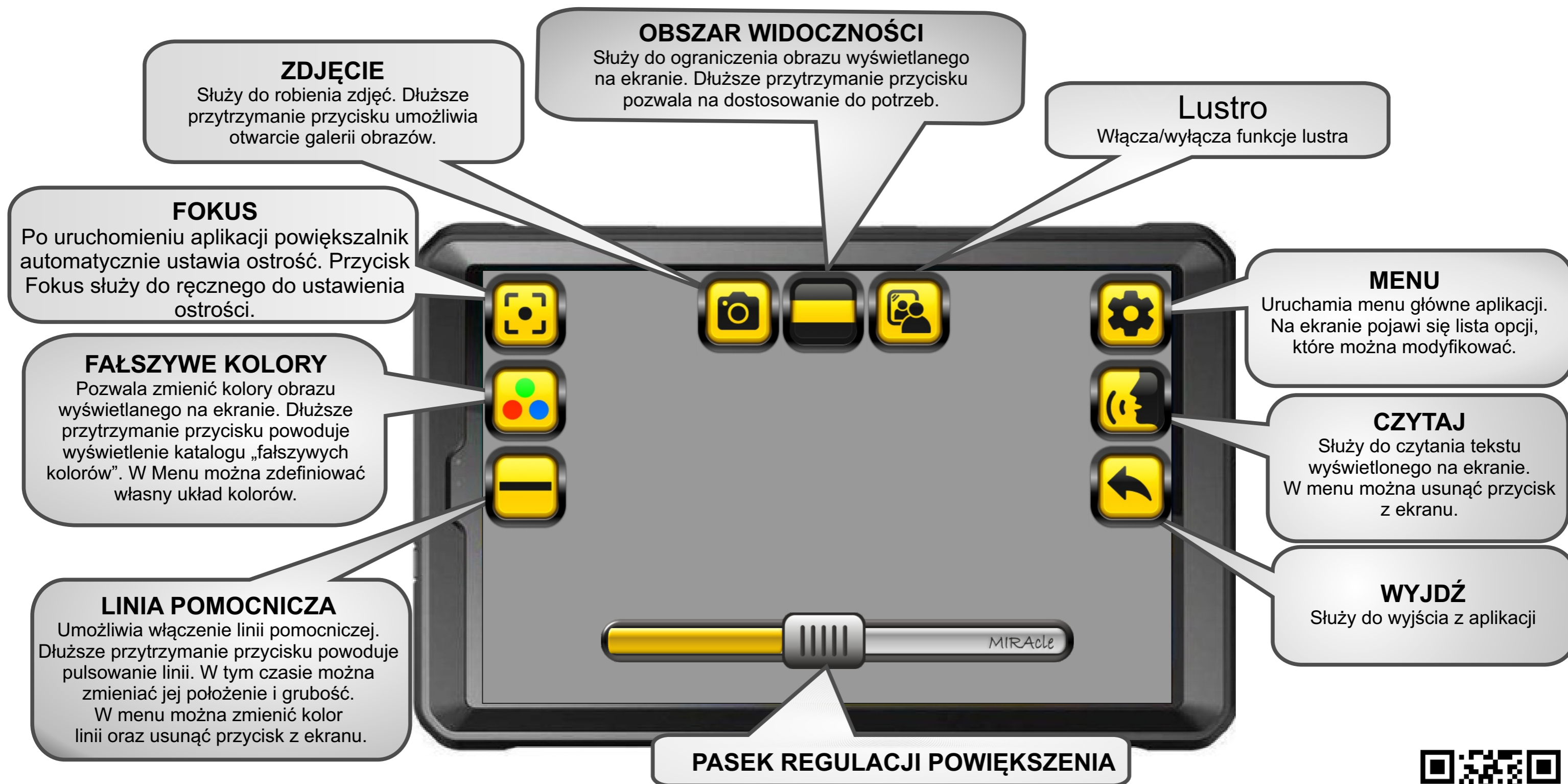

Zanim zaczniesz korzystać przeczytaj o powiększalniku Exigo 3

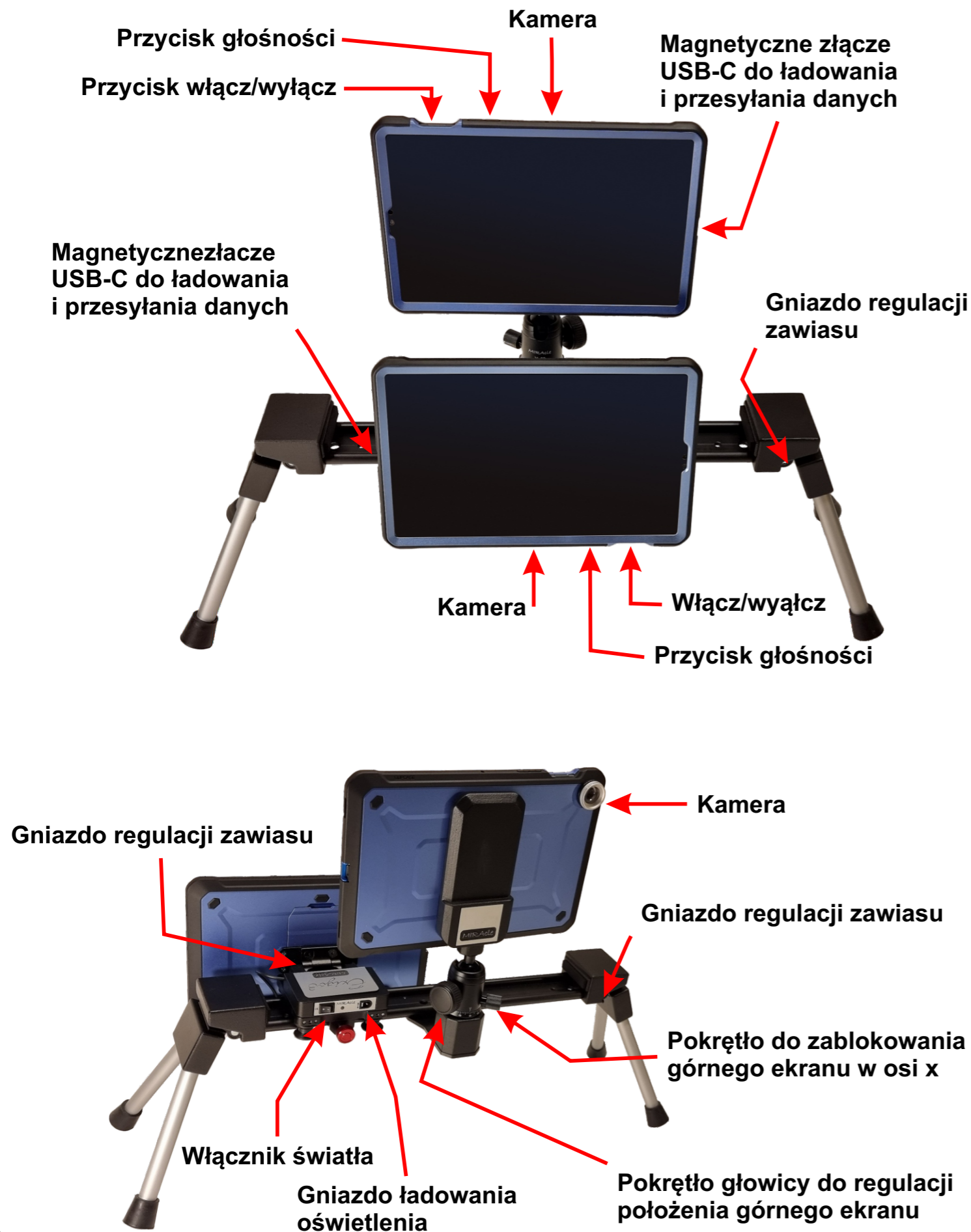

Pierwsze kroki

Po wyjęciu powiększalnika należy:

1. Rozłożyć nogi powiększalnika i umieścić go na równej powierzchni biurka.
2. podnieść górny ekran. Głowica, na której zamontowany jest górny ekran posiada pokrętła służące do ustawienia pozycji ekranu oraz regulacji oporu. Pozwala to na precyzyjne ustawienie pozycji ekranu.
3. Ustawić dolny ekran w pozycji wygodnej do pracy. **Ekran jest zamontowany na regulowanym zawiasie, jeżeli spada lub jest zbyt ciasny należy go wyregulować załączonym kluczem.**
4. Włączyć ekrany.
5. Włączyć oświetlenie dolnego ekranu. Zalecane jest włączenie oświetlenia podczas korzystania z fałszywych kolorów.
6. Uruchomić aplikację lupy dotykając ikony na ekranie.

Ładowanie


Uwaga: Powiększalnik jest dostarczany z częściowo naładowanymi bateriami.

Czas pracy na bateriach min. 6 godzin. Czas ładowania ok. 3 godzin.


Ekrany są ładowane za pomocą kabli magnetycznych, są wygodne w użytkowaniu ale wrażliwe na zanieczyszczenia. Jeżeli występują problemy z ładowaniem należy wyczyścić złącza. Nie załamuj, nie gnij kabli bez potrzeby, to skraca ich żywotność. Kable są materiałem eksploatacyjnym. Co pewien czas może zaistnieć potrzeba ich wymiany. Do ładowania oświetlenia jest osobny przewód DC 2,1/5,5. Do ładowania powiększalnika używaj tylko załączonej ładowarki. Użycie innej grozi uszkodzeniem urządzenia.

Regulacja zawiasów

Powiększalnik jest wyposażony w regulowane i trwałe zawiasy ekranu dolnego i nóg, gwarantujące komfortowe działanie przez cały okres użytkowania powiększalnika. Państwa nowy powiększalnik ma fabrycznie, wyregulowane zawiasy. W pierwszym okresie eksploatacji może zaistnieć potrzeba korekty oporu zawiasów poprzez nieznaczne dokręcenie śrub regulacyjnych. Klucze do regulacji znajdują się w torbie powiększalnika. Zawiasy zawsze można dostosować do swoich potrzeb. Jeżeli Twój ekran opada lub nogi są zbyt luźne konieczne dokręć odpowiednie śruby regulacyjne.

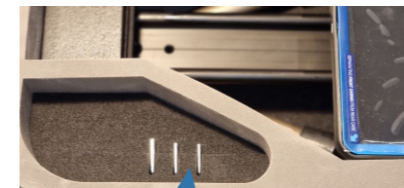

Klucze imbusowe do regulacji zawiasów

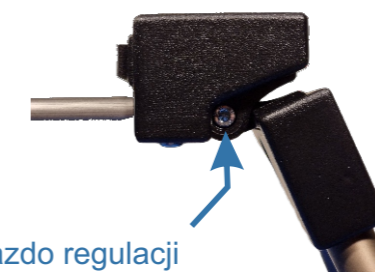

Gniazdo regulacji zawiasu nogi



Gniazdo regulacji zawiasu ekranu

Dyrektywa Unii europejskiej WEEE 2002/96 z 27 stycznia 2003 roku o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Gdy Państwa produkt jest oznaczony powyższym symbolem, oznacza to, że:

- Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy łączyć z odpadami z gospodarstw domowych.
- Dla tego typu odpadów istnieje odrębny system zbiórki odpadów.
- Zgodnie z przepisami prawa nie wolno mieszać odpadów elektrycznych i elektronicznych z innymi odpadami, co zagraża środowisku naturalnemu.



Uwaga: Zużyte baterie powinny być oddzielone od zwykłych odpadów komunalnych i wyrzucone do odpowiedniego pojemnika, przeznaczonego do tego celu.



MIRacle Sp.J.
ul. Piotrkowska 145
90-434 Łódź, Polska
tel.: +48725253535